


Turtle Brace

Simple, Rapide, Efficace

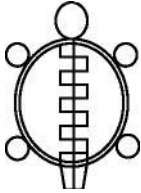



Turtle Brace

Simple, Rapide, Efficace

Turtle Brace est une évolution dans la façon de stabiliser un membre ou une articulation. Cet hybride d'orthèse peut aussi bien être utilisé pour immobiliser une fracture stable que remplacer une orthèse rigide courante.

Turtle Brace est composé d'un thermoplastique basse température écologique fusionné à une enveloppe en tissu microfibre. Il vous permet de stabiliser un segment en une fraction du temps qu'il faut pour faire une immobilisation plâtrée traditionnelle.

Turtle Brace est plus résistant que le polypropylène, les bandes plâtrées ou de fibre de verre, pour une fraction du poids.

Turtle Brace est une orthèse de type « appliquez et oubliez » ne nécessitant aucune préparation du segment avant son application. Ce qui permet au clinicien de se concentrer principalement sur son patient pendant le moulage et non sur la matière.


Turtle Brace se retire plus rapidement et plus facilement qu'une immobilisation plâtrée ou de fibre de verre. Il ne nécessite pas d'instruments spécialisés tels que la scie à plâtre pour le retirer. Donc aucune poussière irritante dans l'air, aucun risque de blessure, aucun bruit et une expérience moins traumatisante pour le client.

Turtle Brace peut être remoulé plusieurs fois sans perdre ses qualités. Ce qui permet d'ajuster l'immobilisation en fonction des pertes d'œdème ou des changements morphologiques.

Turtle Brace peut être ajusté localement (une fois le moulage principal terminé) pour permettre des dégagements ou rectifier des points de pressions.



De plat à moulé en un rien de temps. **Turtle Brace** optimise votre temps clinique.

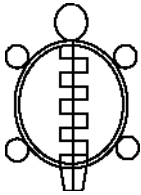

Turtle Brace

Simple, Rapide, Efficace

Turtle Brace réduit les délais et les coûts associés à la production d'orthèses de remplacement pour les phases d'évolution de certains traitements (ex. : Pied bot, déchirure du tendon d'Achille, déformation spastique de la main).

Turtle Brace est radiotransparent. Il peut-être néanmoins retiré le temps de l'imagerie et remis en place après l'examen.

Turtle Brace est micro perforé et peut aller à l'eau. Il ne requiert pas de protocole de séchage. Il peut être retiré, avec l'autorisation du médecin traitant, pour nettoyer le segment, vérifier la peau et permettre un protocole de mobilisation passive.

Turtle Brace est mince (2,4 mm ou 3,2 mm selon le modèle), ce qui permet au client de s'habiller normalement, mettre ses chaussures ou des gants.

Turtle Brace optimise le rendement de votre clinique.


	Thurtle Brace	Plâtre standard	Fibercast	Exos
Temps de fabrication	5 à 10 min.	15 min.	15 min.	5 à 10 min.
Délai de durcissement	20 min.	2 à 3 hrs	30min à 1 hr	20 min.
Temps pour retirer	< 1 min.	5 to 10 min.	5 to 10 min.	1 min.
Utilisation pour cas pédiatrique	✓	✓	✓	
S'insère dans gant ou soulier	✓			
Amovible sans modification	✓			✓
Peut-être remoulé	✓			✓
Modification partielle ou locale	✓			
Moulage des formes complexes et non standard	✓	✓	✓	
Ajustable	✓			✓
Respire	✓			✓
Va à l'eau	✓			✓
Radiotransparent	✓			✓

Distributeur Suisse

REHA-ROBOTICS Srl

Courriel : info@reha-robotics.ch

Tél. : 021 617 83 56 – Fax : 021 617 45 54

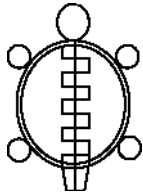

Turtle Brace

Simple, Rapide, Efficace

Turtle Brace une même orthèse pour le membre droit et le membre gauche ; ce qui facilite la gestion votre inventaire.

	Turtle Brace Cheville		Turtle Brace Poignet			
	Fermeture éclair		Fermeture éclair		Velcro	
	Pédiatrique	Adulte	Pédiatrique	Adulte	Pédiatrique	Adulte
Petit	✓	✓		✓		✓
Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Large	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Turtle Brace a développé deux extensions universelles : pouce ou doigts. Ces extensions s'autofusionnent au Turtle Brace de poignet, ce qui vous permet de stabiliser presque toutes les pathologies possibles de la main (ex. : fracture du boxer, limitation de l'extension des doigts, immobilisation du pouce).

Turtle Brace est un hybride d'orthèse extrêmement polyvalent qui vous permet de répondre à tous vos besoins d'immobilisation simple ou complexe facilement sans avoir à tenir un stock complexe et spécialisé.

Distributeur Suisse

REHA-ROBOTICS Sàrl

Courriel : info@reha-robotics.ch

Tél. : 021 617 83 56 – Fax : 021 617 45 54